

Raport serwisowy

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr Jana Biziela w
Bydgoszczy

Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Kontakt	Centrum Operacyjne Serwisu
Telefon	800 120 133
Faks	+48 22 510 1424
E-mail	siemens.cos.pl@siemens-healthineers.com
Zlecenie	600002064639 / 0008
Numer klienta	1000124711
Kontrakt	40123903
NIP Nabywcy	PL9532582266
NIP Nabywcy 2:	9532582266

Typ aktywności	Naprawa serwisowa	Data zgłoszenia	30.10.2023 14:06
Zgłaszający	Joanna Rajmuniak	Urządzenie	Artis zee ceiling
Telefon:	+ 48516785589 /EXT	Numer identyfikacyjny	AT_147875_BYD
Numer referencyjny Klienta	.	Inżynier Serwisu	Pan Misiak
Numer zlecenia	n/a	Czas pracy	31.10.2023 09:30:00 - 31.10.2023 18:45:00

Opis zgłoszenia	Status aparatu	2=Częściowo niesprawny
-----------------	----------------	------------------------

Lampa do wymiany.

Użyte materiały i czas pracy

Pozycja	Numer materiału	Opis	JM	Ilość
000010		Czas pracy (h)		9,25
000020		Strefa dojazdu		1,00
000030	10144180	MEGALIX Cat Plus 125/40/90-122GW	SZT	1

Wykonane usługi

Wymiana części

Diagnostyka zgłoszonych przez użytkownika problemów z promieniowaniem podczas zabiegu - najpierw obraz był ziarnisty i niedoświetlony, następnie wyświetlił się komunikatywny o awarii małego ogniska. Usterka permanentna, wystąpiła po raz pierwszy w dniu zgłoszenia. Diagnostyka wykazała wpisy w logach wpisy świadczące o przebiegach w lampie RTG oraz

Prezes Zarządu: Joanna Maria Miłachowska
Członek Zarządu: Emilia Tkacz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000544569
Kapitał Spółki 41.050.000,-PLN
NIP: 1132885680
BDO: 000012393

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Phone: +48 225101402/03/04
Fax: +48 225101421


Raport serwisowy

Zlecenie	600002064639 / 0008
Numer klienta	1000124711
Kontrakt	40123903
NIP Nabywcy	PL9532582266


komunikat o błędach małego ogniska (AX_ANG 51, AX_PUD 20611). Licznik lampy RTG = 106 TLU.
Wymieniono lampę RTG, przeprowadzono implementację komponentu w systemie oraz niezbędne
dostosowania. Aparat sprawny w zakresie realizowanej naprawy. Aparat pozostawiono do
wykonania testów specjalistycznych.

Pomiary zgodnie z normą IEC62353 Rezystancja przewodu ochronnego w mOhm : 180

PL00562888 Dozymetr Diados T11003
PL01961464 Electrical Safety AnalyzerRigel 62353+

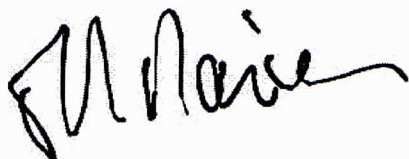

Pan Misiak
Data 31.10.2023

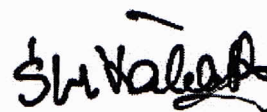

Świtała Renata
Data 31.10.2023
Podpis klienta